

LA OSS SE NÆRMERE PÅ BREEZE[®]2 -APPARATET:



Åpent knappedeksel



Apparatets bakside



1. Åpne apparatet

Snu apparatet (med displayet nedover), og åpne ved å trykke på bakre kant av låsen, trekk deretter opp.



2. Sett inn strimmeldiskett

Sett inn en ny strimmeldiskett med 10 strimler—ruglete side opp.



Lukk apparatet, og knepp det sammen.

VIKTIG:

Hold apparatet vannrett (liggende posisjon).




3. Klargjør stikkepenen

ADVARSEL: Stikkepenen er utviklet for prøvetaking av én enkelt pasient.

Ta av munnstykket på MICROLET[®]2-stikkepenen.



Vri beskyttelseshetten på lansetten rundt en fjerdedels gang (men ikke fjern).

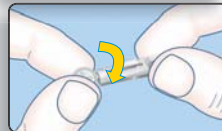

Sett deretter inn lansetten for å lade stikkepenen.



Vir av lansettdekslet, og sett på munnstykket igjen.



For ytterligere informasjon, se i MICROLET 2 pakningsvedlegget.


4. Skyve ut en blodsukkerstrimmel

Trekk og skyv ladehåndtaket for å skyve frem en blodsukkerstrimmel. Apparatet slås på automatisk.



Merk:

Strimmelutløseren er i stillingen OPP, en blodsukkerstrimmel skyves ut og det vises en serie med ledetekster som angir at apparatet nå kan utføre en blodsuktermåling.

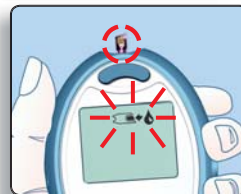

5. Måling

Stikk deg i fingeren og klem ut en liten rund bloddråpe.



Beveg apparatet slik at hele fremre kant av blodsukkerstrimmelen berører bloddråpen. Blodet suges automatisk inn i blodsukkerstrimmelen og fyller den helt.




Hold apparatet/strimmelen stille inntil apparater piper, og flytt deretter apparatet bort fra stikkstedet/bloddråpen.



Måleresultatet vises på displayet etter nedtelling som varer i 5 sekunder, og vil bli lagret automatisk i apparatet for fremtidig bruk.



Hold apparatet over en søppelbøtte med strimmelen pekende nedover, og trykk på **strimmelutløseren**.

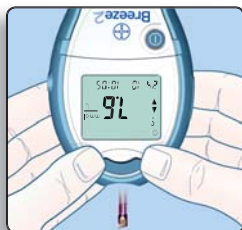


Strimmelen faller i søppelbøtten.

Trykk på **⏻**-knappen for å slå av apparatet og spare batteristrøm. (Se innsiden av forsideomslaget for plassering.)

FEILSØKING OG FEILKODER:



Det har oppstått et problem i forbindelse med fylling av blodsukkerstrimmelen. Gjenta målingen med en ny strimmel.

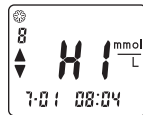

Måleresultatet er over 33,3 mmol/l. Vask hendene og stikkstedet, og gjenta deretter målingen. Hvis HI vises igjen, må du kontakte lege eller helsepersonell.



Lavt batterinivå. Skift batteri (CR2032) innen 20 målinger eller én uke.

Se brukerveiledningen for fullstendig informasjon angående feilsøking og feilkoder.



Bayer Consumer Care AG
Postfach
4002 Basel, Switzerland



0088



Bayer HealthCare

Bayer AS, Diabetes Care
NO-0212 Oslo
Telefon: 24 11 18 00
E-post: diabetes@bayer.no

Bayer

©2008 Bayer
50184429 Rev. 7/08


Breeze²
MÅLESYSTEM FOR BLODSUKKER



LOMMEGUIDE